

## MESOTHERAPIE-KANÜLEN UND IHRE VERWENDUNG (Stand 3/ 2019)

1. **Microlance 0,3X13 mm:** preiswerte Standardnadel für Cellulite, Haare, Schmerztherapie, Carboxytherapie. Universalkanüle für Mesotherapie per Hand, insbesondere für die epidermale Ziehtechnik, lineare oder tower Technik für HA-Filler.
2. **Microlance 0,4X13 mm:** preiswerte Standardnadel für Lipolyse am Körper, subcutane Infiltrationen auch größerer Volumina, z.B. in der Schmerztherapie (Mesoperfusion, Hüftgelenke, LWS) oder Carboxytherapie subcutan bei größeren Fettdepots am Körper.
3. **Mesorelle 0,3X4 mm:** klassische Meso-Kanüle für Mesolift, Schmerztherapie, Haarausfall, Cellulite, Hyperhydrosis axillae, Mesobotox, PROFHILO (bioesthetic points) per Hand oder Gerät zu verwenden.
4. **Mesorelle 0,3X6 mm:** Carboxytherapie intra- oder subcutan. Auch für gezielte Fillerapplikation, z.B. perioral, radiäre Lippenfältchen. Lipolyse im Gesicht/Halsbereich.
5. **Mesorelle 0,26 oder 0,23X4 mm:** feinste Meso-Nadeln mit geringerem Durchfluss für punktuelle und epidermale Techniken bei hypersensiblen Patienten oder empfindlichen Bereichen, wie z.B. Kopf, Hände, Füße, perioral, perioculär. Wesentlich schmerzärmer. Carboxytherapie im lateralen Augenbereich.
6. **Mesorelle 0,3X25 mm:** feine längere Nadel für intradermale lineare Applikation von HA (z.B. Redensity I, RHA 1) in oberflächliche Fältchen (Stirn, Hals, Lippenrand). Hohe Elastizität und leichtes Gleiten im Gewebe.
7. **Mesorelle 0,4X25 mm:** speziell für lineare Technik für höher vernetzte HA-Filler, „windmill“ oder „fan“ Technik, größere zu unterspritzende Linien oder Bereiche. Besonders geeignet für atraumatische, schmerzfreie **im. Injektionen** bei schlanken Patienten.
8. **Mesorelle 0,4X40 mm:** für lineare Technik höher vernetzter HA-Filler und für **i.m** Injektionen bei größerer Fettschicht.
9. **Feel soft needle 0,2X4 mm:** UTW-(ultra thin wall) Kanüle für minimalen Einstichschmerz und bestmöglichen Komfort. Größerer Durchfluss als bei der Mesorelle gleicher Größe aufgrund der extrem feinen Wand. Speziell geeignet für PRP-Anwendungen (Haut und Haar).
10. **TSK Invisible Needle 0,2X9 mm:** „high Tech“ Kanüle, ermöglicht quasi schmerzfreie Infiltrationen, z.B. bei hypersensiblen Patienten, in der Schmerztherapie, bei Mesohair, Behandlung oberflächlicher Fältchen (Stirn-, Mund- und Augenbereich), in der Zahnmedizin. Gute Stabilität und Durchfluss (nicht kompatibel zu den Meso-Injektoren)

Bezugsquelle: [www.mesotherapie-shop.de](http://www.mesotherapie-shop.de)