

Unsere PRP Offerte: die Trichter/ = Kits sind ab sofort über uns zu beziehen, die genannten Preise (ab je 29 €) sind netto, ab 10 Stück liefern wir frachtfrei, ab 50 Stück gewähren wir zusätzlich Naturalrabatt.

Bei Bedarf ist auch eine sehr leistungsfähige Zentrifuge erhältlich (siehe www.mesotherapie-shop.de)

Die Vorteile unseres PRP-Kits gegenüber anderen Anbietern sind folgende:

1. Eine weitaus höhere Konzentration der Thrombozyten (7-9 fache Konzentration) als Ergebnis nach dem Zentrifugieren
2. Sehr einfach in der Anwendung.
3. Trotz der hochwertigen Qualität des Produkts und der patentierten Y-Form für eine einfache Entnahme der konzentrierten Thrombozyten, ist unser Produkt wesentlich preisgünstiger.

Fragen Ihrerseits an uns und unsere Antworten:

1. **Wie viele und in welchen Intervallen sollte man die PRP-Therapie anbieten (Ästhetik)?**

Wir empfehlen 3-5 Therapien in 4-6 Wochen Abständen,
Danach eine Therapie jährlich. Aber dies ist nur eine Empfehlung unsererseits, letztendlich entscheiden Sie bzw. der Patient das.

2. **Was brauche ich für die Therapie?**

Je Therapie 1X20 ml Spritze, 3 ml Spritze, 2X18 G Nadel, 1X Butterfly Nadel, Therapienadel und 1,5ml Antikoagulans (Natriumcitrat 3,13% Amp. 10x10ml, zu beziehen rezeptfrei über Apotheken)

Bezugsquellen Spritzen:

3 + 5 ml www.mesotherapie-shop.de

20 ml www.medi-inn.de/de/einmalspritzen-einwegspritzen-spritzen-von-romed-medical-auswahl-menge-u-groesse_385641.html

18 G Nadel:

Fine-Ject (Füllkanülen für PRP, extra stumpf) 18 G 1,2x40 mm www.mesotherapie-shop.de

3. **Wieviel Blut und Antikoagulans (Natriumcitrat) entnehme ich?**

Zuerst 1,5 ml Antikoagulans mit 20ml Spritze entnehmen, die Wand damit benetzen, dann 13,5 ml Blut entnehmen.

Natriumcitrat 3,13% Ampullen 10x10ml

PPS Natrium citrium 3,13% Ph. Eur.

Medipac GmbH/ zu bestellen über Apotheke oder Medizinbedarfshandlung, rezeptfrei

4. **Wie zentrifugiere ich?**

Mit einer Zentrifuge stellen Sie ein: 3400-3600 Umdrehungen bei 4min.

Danach drehen Sie das Buffy Coat (das milchig Weiße/Thrombozytenkonzentrat) hoch bis zur Mitte des PRP-Kits und überprüfen die Menge des Buffy Coats.

Nur wenn nicht ausreichend Buffy Coat vorhanden ist, weitere 2 min zentrifugieren.

Wenn möglich nicht zu oft bzw. zu lang zentrifugieren, damit so wenig wie möglich an Thrombozyten und somit die Wachstumsfaktoren beschädigt werden.

5. **PRP-Kits, Zentrifuge, Therapie- und Fin-Ject Kanülen, Meso Injektoren**

www.mesotherapie-shop.de